

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření	
	Zkratka: SEZ-18	Zpracoval:Hind'oš Hřebačková
	Verze: 2	Schválil: Hind'oš
	Strana/celkem: 1/12	Platnost od: 24.6.2025

Biochemie a imunologie										
Název vyšetření (zkratka na žádance)	Primární materiál	Jiný materiál				Stabilita			Dodací lhůta	poznámky
						15 – 25 °C	2 – 8 °C	-20 °C		
Ab+Ag HIV (a-HIV1/2,p24)						1D	2T	-	1D	Akreditovaná metoda.
AFP						1D	1T	-	1D	
Albumin						-	3D	2M	1D	Interference při lipémii. Akreditovaná metoda.
Albuminurie						-	2T	5M	1D	
Alfa-1-antitrypsin (α_1 -antitrypsin)						1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
ALP						8H	7D	6M	1D	Akreditovaná metoda.
ALT						3D	7D	1M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Akreditovaná metoda.
Amyláza celková						8D	1M	1R	1D	Akreditovaná metoda.
Amyláza celková v moči						10D	1M	-	1D	
Amyláza pankreatická						8D	1M	1R	1D	
ANA IgA,IgM						-	2T	6M	2T	
ANA IgG						-	2T	6M	2T	
ANCA screen						-	2T	6M	2T	
Anti-B.parapertussis IgA						-	2T	6M	1T	
Anti-B.parapertussis IgG						-	2T	6M	1T	
Anti-B.pertussis IgA						-	2T	6M	1T	
Anti-B.pertussis IgG						-	2T	6M	1T	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření									
	Zkratka: SEZ-18					Zpracoval:Hind'oš Hřebačková				
	Verze: 2					Schválil: Hind'oš				
	Strana/celkem: 2/12					Platnost od: 24.6.2025				

Anti-Borrelia IgM (BLOT)					-	2T	6M	1T	
Anti-Borrelia IgM (ELISA)					-	2T	6M	1T	
Anti-Borrelia. IgG (BLOT)					-	2T	6M	1T	
Anti-Borrelia. IgG (ELISA)					-	2T	6M	1T	
Anti-CCP IgG (<i>anti-CCP</i>)					2D	2T	3M	1D	
Anti-CMV IgG (<i>anti-CMV IgG,M</i>)					2D	2T	1R	1D	
Anti-CMV IgM (<i>anti-CMV IgG,M</i>)					2D	2T	6M	1D	
Anti-deamidovaný gliadin IgA (<i>anti-deam.gliadin IgA</i>)					-	2T	6M	1T	
Anti-deamidovaný gliadin IgG (<i>anti-deam.gliadin IgG</i>)					-	2T	6M	1T	
Anti-dsDNA IgG					-	2T	6M	2T	
Anti-EBNA IgG (<i>anti-EBV IgG,M</i>)					-	3D	6M	1D	
Anti-EBV VCA IgG (<i>anti-EBV IgG,M</i>)					-	3D	6M	1D	
Anti-EBV VCA IgM (<i>anti-EBV IgG,M</i>)					-	3D	6M	1D	
Anti-ENA typizace (Sm,RNP/Sm,SSA,SSB,Scl70,Jo-1))					-	2T	6M	2T	
Anti-endomysium IgA					-	2T	6M	1T	
Anti-gliadin IgA					-	2T	6M	1T	
Anti-gliadin IgG					-	2T	6M	1T	
Anti-HAV celkové					1D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HAV IgM					1D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HBc celkové					2D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HBc IgM					2D	1T	6M	1T	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HBe (<i>anti-HBe, HBeAg</i>)					2D	1T	6M	1T	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HBs					2D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HCV					1D	2D	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-Helicobacter pylori IgG					-	3D	6M	1D	
Anti-HSV IgG (<i>anti-HSV 1/2 IgG,M</i>)					1D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-HSV IgM (<i>anti-HSV 1/2 IgG,M</i>)					1D	1T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-Chlamydia IgA BLOT (<i>Anti-Chlamydia BLOT IgG,A</i>)					1D	2T	6M	2T	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření							
	Zkratka: SEZ-18				Zpracoval: Hindoš Hřebačková			
	Verze: 2				Schválil: Hindoš			
	Strana/celkem: 3/12				Platnost od: 24.6.2025			

Anti-Chlamydia IgG BLOT (Anti-Chlamydia BLOT IgG,A)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia pneumoniae IgA (Anti-C.pneumoniae IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia pneumoniae IgG (Anti-C.pneumoniae IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia pneumoniae IgM (Anti-C.pneumoniae IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia psittaci IgA (Anti-C.psittaci IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia psittaci IgG (Anti-C.psittaci IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia psittaci IgM (Anti-C.psittaci IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia trachomatis IgA (Anti-C.trachomatis IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia trachomatis IgG (Anti-C.trachomatis IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-Chlamydia trachomatis IgM (Anti-C.trachomatis IgG,A,M)						1D	2T	6M	2T	
Anti-klíšťová encefalitida IgG (Anti-klíšťová enc. IgG,M)						-	4D	6M	1D	
Anti-klíšťová encefalitida IgM (Anti-klíšťová enc. IgG,M)						-	4D	6M	1D	
Anti-kravské mléko IgA						-	2T	6M	1T	
Anti-kravské mléko IgG						-	2T	6M	1T	
Anti-Morbilli IgG (Anti-Morbilli IgG,M)						2D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-Morbilli IgM (Anti-Morbilli IgG,M)						2D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-MPO (Anti-MPO, Anti-PR3)						-	2T	6M	2T	
Anti-Mycoplasma pn. IgA						1D	2T	6M	1D	
Anti-Mycoplasma pn. IgG						1D	2T	6M	1D	
Anti-Mycoplasma pn. IgM						1D	2T	6M	1D	
Anti-Parotitis IgG (Anti-Parotitis IgG,M)						-	1T	-	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-Parotitis IgM (Anti-Parotitis IgG,M)						-	1T	-	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-PR3 (Anti-MPO, Anti-PR3)						-	2T	6M	2T	
Anti-Rubeola IgG (Anti-Rubeola IgG,M)						3D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-Rubeola IgM (Anti-Rubeola IgG,M)						3D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Anti-streptolysin O (ASLO)						1D	1T	1M	1D	Akreditovaná metoda.
Anti-tetanus IgG (Tetanus)						-	2T	6M	1D	
Anti-Toxoplasma IgA						1D	2T	6M	1D	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření							
	Zkratka: SEZ-18				Zpracoval: Hind'oš Hřebačková			
	Verze: 2				Schválil: Hind'oš			
	Strana/celkem: 4/12				Platnost od: 24.6.2025			

Anti-Toxoplasma IgG (<i>Anti-Toxoplasma IgG,M</i>)					7D	2T	6M	1D	
Anti-Toxoplasma IgM (<i>Anti-Toxoplasma IgG,M</i>)					1D	2T	6M	1D	
Anti-transglutaminasa IgA (<i>anti-tTG IgA</i>)					-	2T	6M	1T	
Anti-transglutaminasa IgG (<i>anti-tTG IgG</i>)					-	2T	6M	1T	
Anti-TSHR (TSI)					1D	1T	6M	1D	
Anti-tyreoglobulin (<i>Anti-TG</i>)					8H	1T	6M	1D	Akreditovaná metoda.
Anti-tyreoperoxidáza (<i>Anti-TPO</i>)					8H	1T	6M	1D	Akreditovaná metoda.
Anti-VZV IgG (<i>Anti-VZV IgG,M</i>)					-	4D	6M	1D	
Anti-VZV IgM (<i>Anti-VZV IgG,M</i>)					-	4D	6M	1D	
AST					3D	1T	1M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Akreditovaná metoda.
Beta-2-mikroglobulin (<i>β₂-mikroglobulin</i>)					1D	1T	3M	1D	
Bilirubin celkový					1D	5D	3M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Akreditovaná metoda.
Bilirubin konjugovaný					1D	5D	3M	1D	
Bílkovina celková					1D	1T	2T	1D	Akreditovaná metoda.
Bílkovina celková v moči					1D	3D	1R	1D	
C3-komplement (<i>C3</i>)					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
C4-komplement (<i>C4</i>)					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
CA 125					8H	1D	-	1D	
CA 15-3					8H	1D	-	1D	
CA 19-9					8H	2D	-	1D	
CA 72-4					1D	4T	3M	1D	
CEA					8H	2D	-	1D	
CK-MB mass					4H	2D	-	1D	
Clearance kreatininu					-	1D	-	1D	
C-peptid					8H	2D	-	1D	
C-reaktivní protein (CRP)					29H	1T	6M	1D	Akreditovaná metoda.

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření									
	Zkratka: SEZ-18					Zpracoval: Hindoš Hřebačková				
	Verze: 2					Schválil: Hindoš				
	Strana/celkem: 5/12					Platnost od: 24.6.2025				

Cystatin C						1D	1T	3M	1D	
DHEA-S						1D	6D	1M	1D	
Draslík (K)						8H	2T	1R	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Draslík v moči (K)						-	1T	1M	1D	Akreditovaná metoda.
ECP						-	1T	3M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky a plasmu.
Elektroforéza bílkovin						1D	2T	1R	2T	
ENA screen						-	2T	6M	2T	
Estradiol						20H	2D	6M	1D	
Feritin						8H	2D	-	1D	
Fosfor anorganický (P)						4D	1T	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Fosfor anorganický v moči (P)						-	2D	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
FSH						8H	2D	-	1D	
GGT						7D	7D	6M	1D	Akreditovaná metoda.
Glukóza						1D	1T	1R	1D	Akreditovaná metoda. Stabilita v plazmě.
Glukóza v moči (Glukóza)						-	1D	-	1D	Akreditovaná metoda.
Glykovaný hemoglobin						2D	5D	1R	1D	Akreditovaná metoda.
HBeAg (anti-HBe, HBeAg)						-	1T	-	1T	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
hCG						8H	2D	-	1D	
HDL cholesterol						-	8D	1M	1D	Akreditovaná metoda.
Homocystein						-	2D	3M	1D	
Hořčík (Mg)						-	1T	1R	1D	Akreditovaná metoda.
Hořčík v moči (Mg)						-	1D	-	1D	
hs-Troponin I						8H	1D	1M	1D	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření							
	Zkratka: SEZ-18				Zpracoval: Hind'oš Hřebačková			
	Verze: 2				Schválil: Hind'oš			
	Strana/celkem: 6/12				Platnost od: 24.6.2025			

Chloridy (<i>Cl</i>)					8H	2T	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Chloridy v moči (<i>Cl</i>)					-	1D	-	1D	Akreditovaná metoda.
Cholesterol					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Cholinesteráza					1D	1T	4T	1D	
Imunofixace séra					1D	2T	1R	2T	
Imunoglobulin A (<i>IgA</i>)					3D	1T	6M	1D	Akreditovaná metoda.
Imunoglobulin E (<i>IgE</i>)					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Imunoglobulin G (<i>IgG</i>)					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Imunoglobulin M (<i>IgM</i>)					1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Jaterní blot (AMA-M2,LKM1,SLA,LC1)					-	2T	6M	2T	
Kalprotektin ve stolici (<i>Kalprotektin</i>)					1T	1T	-	1D	
Kortizol ranní (<i>Kortizol</i>)					8H	2D	-	1D	
Kreatinin					2D	8D	1M	1D	Akreditovaná metoda.
Kreatinin v moči (<i>Kreatinin</i>)					-	8D	1M	1D	Akreditovaná metoda.
Kreatinkináza (<i>CK</i>)					2D	1T	1M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Kyselina listová					8H	2D	1M	1D	
Kyselina močová					3D	5D	6M	1D	Akreditovaná metoda.
Kyselina močová v moči (<i>Kyselina močová</i>)					-	1D	-	1D	Akreditovaná metoda.
LD					2D	4D	4T	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
LDL cholesterol					12H	10D	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
LH					7D	2T	3R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření				
	Zkratka: SEZ-18			Zpracoval: Hindoš Hřebačková	
	Verze: 2			Schválil: Hindoš	
	Strana/celkem: 7/12			Platnost od: 24.6.2025	

Lipáza					1D	1T	1R	1D	
Moč chemicky-bilirubin (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-bílkovina (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-glukóza (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-hustota (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-ketolátky (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-krev (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-pH (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Moč chemicky-urobilinogen (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-bakterie (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-epitelie dlaždicové (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-epitelie jiné (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-erytrocyty (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-hlen (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-krystaly (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-ktasinky (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-leukocyty (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-spermie (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-válce hyalinní (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Močový sediment-válce patologické (<i>Moč chem.+sediment</i>)					-	1D	-	1D	
Myoglobin					8H	2D	-	1D	
NT-proBNP					6H	3D	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
oGTT					1D	1T	1R	1D	
oGTT- těhotenství					1D	1T	1R	1D	
Okulní krvácení kvantitativně					-	1T	-	1D	
Osteokalcin					1D	3D	6M	1D	
P1NP					1D	1T	6M	1D	
Parathormon					8H	8H	1M	1D	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření									
	Zkratka: SEZ-18					Zpracoval:Hind'oš Hřebačková				
	Verze: 2					Schválil: Hind'oš				
	Strana/celkem: 8/12					Platnost od: 24.6.2025				

Paul Bunnell						1D	2T	6M	1D	
Povrchový Ag HBV (HBsAg)						1D	2T	-	1D	Akreditovaná metoda.
Progesteron						1D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Prolaktin						1D	7D	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Prostatický specifický antigen – volný (<i>fPSA</i>)						1D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Prostatický specifický antigen (<i>PSA celkový</i>)						1D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Revmatoidní faktor (<i>RF</i>)						1D	1T	1M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
SHBG						-	3D	1M	1D	
Sodík (<i>Na</i>)						8H	2T	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Sodík v moči (<i>Na</i>)						-	1D	-	1D	Akreditovaná metoda.
Specifické IgE – Atopický panel (<i>Atopický</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Inhalační panel (<i>Inhalační</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Pediatrický inhalační panel (<i>Pediatrický inhalační</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Potravinový panel (<i>Potravinový</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Rekombinantní hmyzí panel (<i>Rekombinantní hmyzí</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Rekombinantní inhalační panel (<i>Rekombinantní inhalační</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgE – Rekombinantní potravinový panel (<i>Rekombinantní potravinový</i>)						-	2T	6M	1T	
Specifické IgG proti potravinám (<i>IgG potraviny (kr.mléko,pšenice,ořechy,treska,sója)</i>)						-	2T	6M	1T	
β-CrossLaps (CTx)						1D	-	-	1D	
Syfilis RRR (<i>RRR</i>)						1D	2T	6M	1D	
Syfilis TPPA						1D	2T	6M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
T3 celkový (<i>T3</i>)						1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
T3 volný (<i>ft3</i>)						1D	2T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření			
	Zkratka: SEZ-18		Zpracoval: Hindoš Hřebačková	
	Verze: 2		Schválil: Hindoš	
	Strana/celkem: 9/12		Platnost od: 24.6.2025	

T4 celkový (<i>T4</i>)						1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
T4 volný (<i>fT4</i>)						1D	2T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Testosteron						1D	1T	4M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Thyreoglobulin						1D	-	-	1D	
Transferin						1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Triacylglyceroly (<i>TAG</i>)						2D	1T	2R	1D	Interference při iktericitě, kys. askorbová. Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Tyreotropin (TSH)						1D	5D	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Urea						1D	2T	1R	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Urea v moči (<i>Urea</i>)						2D	10D	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Vápník (<i>Ca</i>)						8H	2T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online) Akreditovaná metoda.
Vápník ionizovaný (<i>výpočet</i>)						1D	1T	3M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Vápník v moči (<i>Ca</i>)						2D	1D	-	1D	Akreditovaná metoda.
Vitamin B12						3D	10D	2M	1D	Zdroj: Příručka lab. vyšetření, FONS (online)
Vitamín D (<i>25-OH vitamín D</i>)						1D	7D	1R	1D	
Železo (<i>Fe</i>)						4D	7D	2M	1D	Nepoužívejte hemolyzované vzorky. Lékové interference - viz. SOPV-23 Akreditovaná metoda.

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření	
	Zkratka: SEZ-18	Zpracoval: Hindoš Hřebačková
	Verze: 2	Schválil: Hindoš
	Strana/celkem: 10/12	Platnost od: 24.6.2025

Hematologie											
Název vyšetření	Primární materiál	Jiný materiál				Stabilita			Dodací lhůta	poznámky	
						15 – 25 °C	2 – 8 °C	-20 °C			
Krevní obraz + diferenciální rozpočet leukocytů											
Leukocyty (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Erytrocyty (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Hemoglobin (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Hematokrit (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Střední objem erytrocytů (MCV) (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Střední množství hemoglobinu v erytrocytu (MCH) (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Střední koncentrace hemoglobinu v erytrocytech (MCHC) (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Trombocyty (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Šíře distribuce erytrocytů (RDW) (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Střední objem trombocytů (MPV) (KO+diferenciál)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Další vyšetření											
Retikulocyty						1D	-	-	1D		
Sedimentace						1D	-	-	1D		
CD3, CD4, CD8, CD19, NK						1D	-	-	1D		
HLAB27 screening						1D	-	-	1D		
Koagulační vyšetření											
Aktivovaný tromboplastinový test (APTT)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	
Protrombinový test (Quick test- INR)						1D	-	-	1D	Akreditovaná metoda.	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření									
	Zkratka: SEZ-18					Zpracoval: Hind'oš Hřebačková				
	Verze: 2					Schválil: Hind'oš				
	Strana/celkem: 11/12					Platnost od: 24.6.2025				

Fibrinogen						1D	-	-	1D	
D-dimery						1D	-	-	1D	

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení

AGILAB group s.r.o. Velehradská 23 130 00 Praha 3	Seznam laboratorních vyšetření	
	Zkratka: SEZ-18	Zpracoval:Hind'oš Hřebačková
	Verze: 2	Schválil: Hind'oš
	Strana/celkem: 12/12	Platnost od: 24.6.2025

Vysvětlivky:

	Sérum - gel
	K2EDTA
	Li-Heparin
	NaF/Na2EDTA
	Na-citrát
	Moč
	Stolice
-	údaje nejsou dostupné
D/T/M/R	Den/Týden/Měsíc/Rok

Zdroje: příbalový leták metody (když není uvedeno jinak)

Změna: Změna odběrového materiálu a stabilit vzhledem ke změně přístrojového vybavení